

# ИНСТРУКЦИЯ

## по применению дезинфицирующего средства «Дез-Хлор»

**Сфера применения дезсредства согласно инструкции:** ЛПУ, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения (детсады, школы и т.п.), Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Коммунальные объекты (бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), Парикмахерские, Санитарный транспорт, В быту населением, Учреждения культуры, отдыха (кинотеатры, музеи, театры), Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Вирусологические лаборатории

**Объекты обработки (инструкция на дезсредство № 2/2008 от 2008):** Белье нательное, Белье постельное, Жесткая мебель, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), Мокрота, Моча, Одноразовая посуда, Поверхности в помещениях, Предметы для мытья посуды, Предметы ухода за больными, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Столовая посуда, Уборочный инвентарь.

**Химический состав дезсредства Дез-хлор:** Хлорсодержащие (выделяющие активный хлор).

**Действующие вещества:** Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84 %. Содержание активного хлора - 1.5г/1 таб.

**Особые свойства:** Класс опасности: при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора – 4.

**Активно в отношении:** Бактерии - *Mycobacterium tuberculosis*, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии; Вирусы - Аденовирусы, ВИЧ, Герпеса, Грипп, Коксаки, ЕСНО, Парентеральных гепатитов, Полиомиелит, Прочие возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа (H5N1), Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы; Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида.

**Вес таблетки - 3.350 г.** (используется для расчета потребности дезсредств).

### Основные режимы применения дезсредства Дез-хлор:

Режим	Конц / эксп
Дезинфекция поверхностей по бактериям (исключая туберкулез)	0.015 % / 60 мин.
Дезинфекция поверхностей по вирусным инфекциям	0.015 % / 60 мин.
Дезинфекция поверхностей по кандидозу	0.06 % / 60 мин.
Дезинфекция поверхностей по дерматофитам	0.06 % / 60 мин.
Дезинфекция поверхностей по туберкулезу	0.06 % / 60 мин.
Дезинфекция ИМН при бактериальных, вирусных инфекциях и кандидозе	0.06 % / 90 мин.
Дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН при бактериальных, вирусных инфекциях и кандидозе	Нет режима
Предстерилизационная очистка ИМН	Нет режима
ДВУ эндоскопов	Нет режима
Стерилизация изделий медицинского назначения	Нет режима
Дезинфекция крови	Нет режима
Дезинфекция мокроты	Нет режима
Дезинфекция фекалий	Нет режима

### Расход дезсредства на поверхности:

Способ применения	Объем	Ед. изм.
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар"	150	мл/м <sup>2</sup>
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом	300	мл/м <sup>2</sup>
Расход средства на поверхности способом протирание	150	мл/м <sup>2</sup>